


# 採血の方法

## キットの内容物

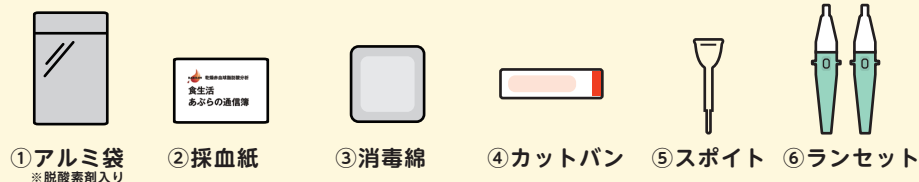


## 採血の前に

- ・室温など、極端な高温低温を避けた場所で採血してください
- ・アルコールアレルギーの方は、手ゆびの洗浄のみにしてください
- ・手を温める／グーパーを繰り返す／手を揉む／など、血液を出しやすくする




## 採血紙に名前の記入と、指の消毒

採血紙に、採血日とお名前を記入する。採血前に石けんで手を洗い、消毒綿で採血する指先を消毒する。使用方法の動画をご確認ください。

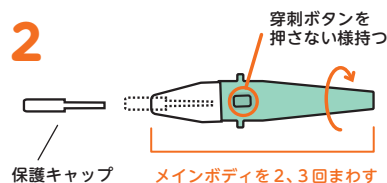


## メインボディを回し、保護キャップを外す

穿刺ボタンを押さない様に持ち、保護キャップを持ってメインボディを2、3回まわし、保護キャップを外す。

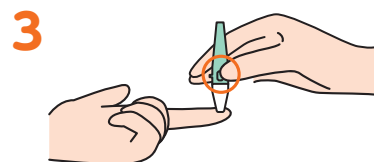

## 指先にランセットを当てボタンを押す


指先にランセットをしっかりと当て、穿刺ボタン（黒い四角部分）を1回押す。ボタンを押したらすぐに離してください。

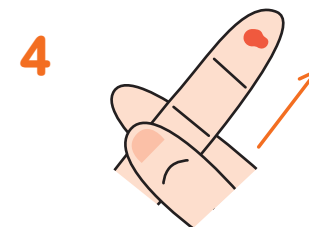

## 血液を押し出す


指の付け根から、絞り出すようにして血液を押し出す。

※採血後は、カットバンで止血・保護してください

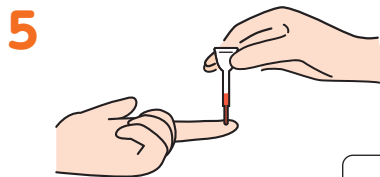


## スポイトで血液を採取する

スポイトで血液を吸い上げる。  
スポイトの軸の部分より下まで吸い上げる様にとスムーズです

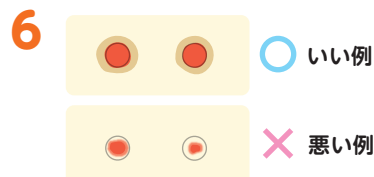


## 濾紙に血液を落とす

円形の濾紙に血液を丸部分から、はみ出るくらいの量を落とす。4～6の工程を繰り返す。  
※血液量が足りないと検査できません。血液量が少ない場合には、一つの濾紙のみに滴下してください  
※丸い濾紙は強く触らないようにしてください

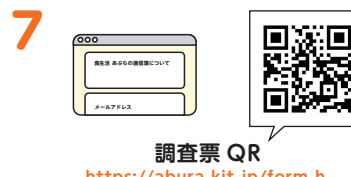

## 濾紙を開いたまま乾燥させ、調査票に入力する

直射日光の当たらない涼しいところで2時間ほど自然乾燥し、その間に右上のQRコードから調査票を入力する。

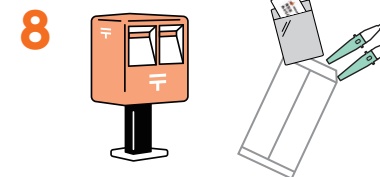

## 返送用封筒に入れ、ポストに投函

封筒に「採血紙入りアルミ袋」と「ランセット2つ※」を使用・未使用に関わらず入れ、ポストに投函する。

※医療廃棄物として当社で処分します